

GLAZING

RECOMENDAÇÃO PARA LENTES GRADUADAS

- Funciona melhor com base curva
- Outras bases curvas (3-6) possível
- São possíveis todos os materiais de lente


GLAZING AID:

- Former
- OMA data


Attention: cold glazing only




ENCURTAR A HASTE

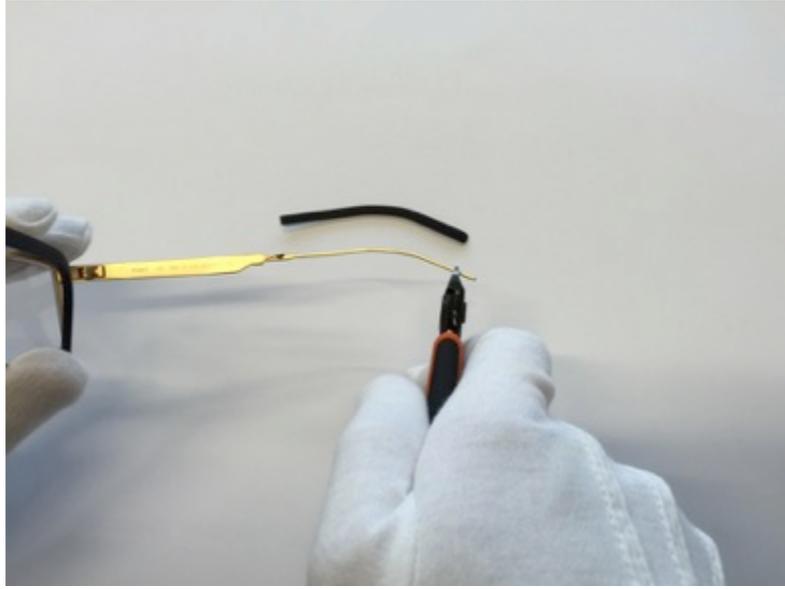

Depois de quebrar a cola com um alicate, encurte a haste com uma ferramenta de corte

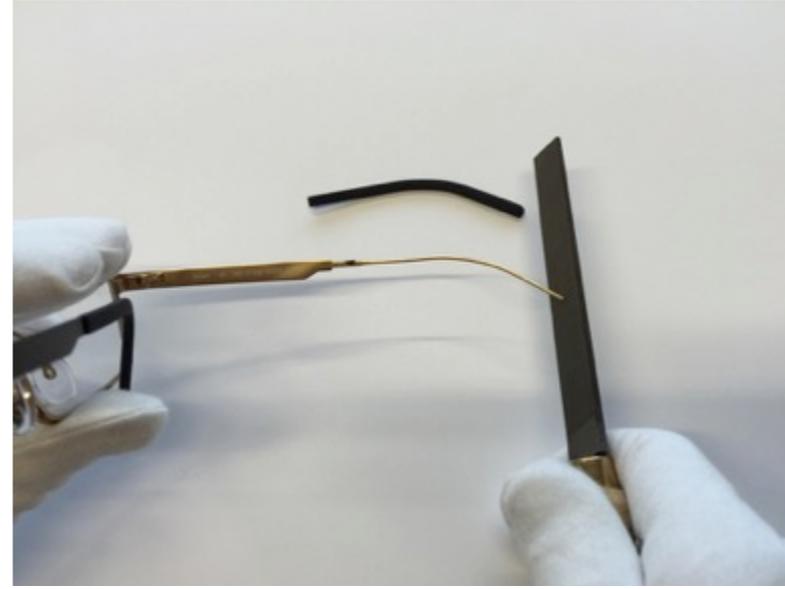


Limar as arestas

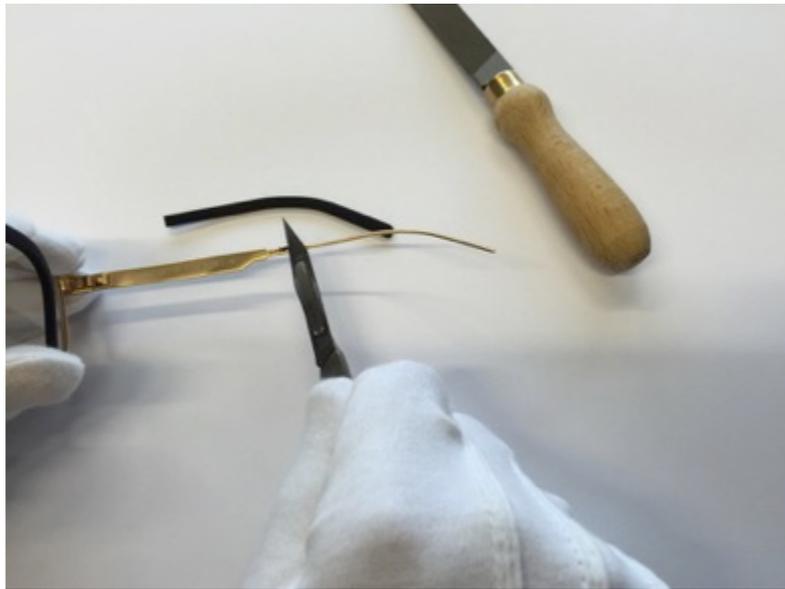

Remova o resto da cola

Atenção: Seja cuidadoso enquanto remove a cola

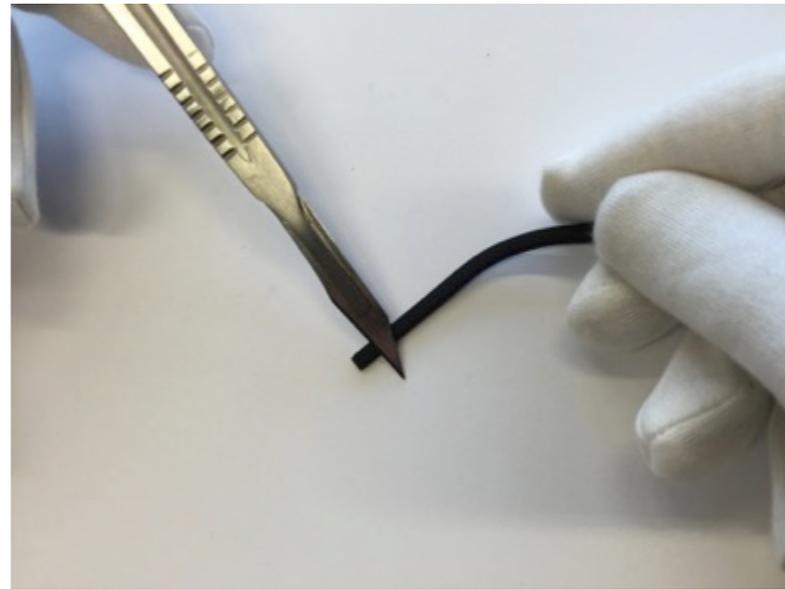


Encurte a parte final da haste, nas marcas certas com um bisturi

AJUSTE DAS HASTES



Endireite o fim da haste aos poucos.

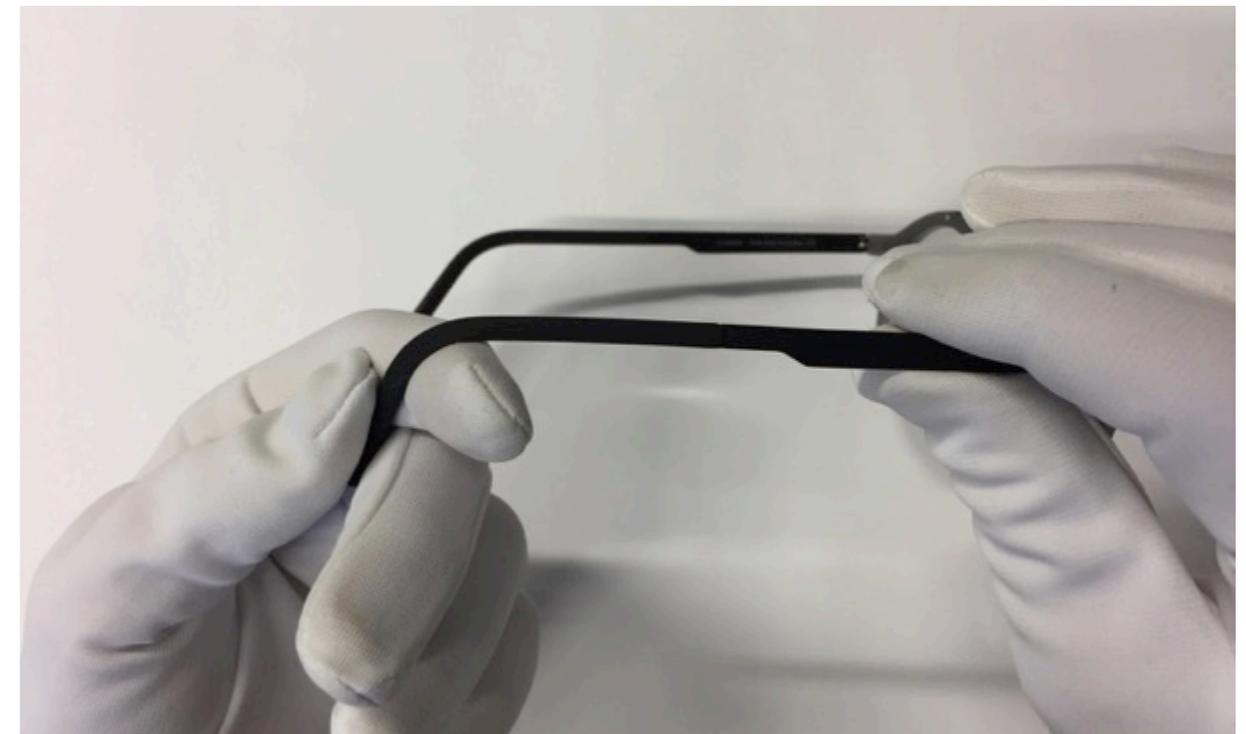

Ajuste a haste, dobrando-a.

Pode aquecer o material até 70°